


Attends® Contours



Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

1

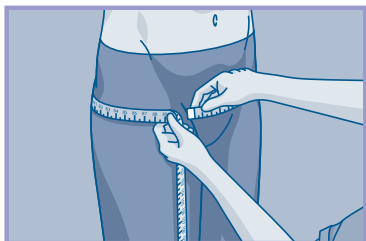

Het is aanbevolen om de Attends Stretch Pants te gebruiken in combinatie met de Attends inleggers van Contours (absorptieniveau 5-10). Maak gebruik van het speciale Attends meetlint en meet daarmee de heup of omvang van het middel. Op het meetlint of de assortimentskaart van Attends kunt u de benodigde maat handig aflezen.

2




Trek de Stretch Pant aan en laat deze vervolgens zakken tot net boven de knieën en trek vervolgens de heupband iets strak naar boven richting de bovenbenen.

Vouw de inlegger volledig open met de zachte absorberende laag naar boven.

Strek de inlegger en maak er voorzichtig een bootvorm van in de lengte zodat de anti-lek randjes overeind staan. De anti-lek randjes vormen zich vanzelf met de natuurlijke pasvorm van de inlegger.


Gebruik

3

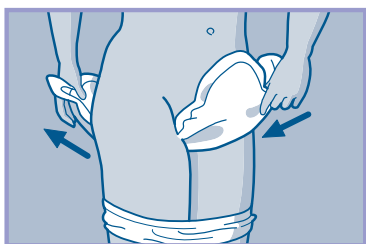


Plaats de inlegger tussen de benen zoals hiernaast weergegeven met de brede kant aan de achterzijde van het lichaam.

4

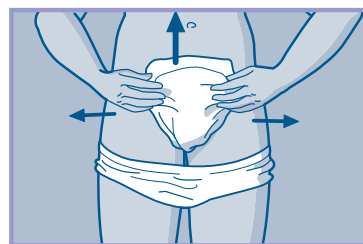


Strijk de inlegger voorzichtig glad tegen het lichaam en zorg voor een goede aansluiting aan voor- en achterzijde. Trek vervolgens de Stretch Pants omhoog tot tegen het kruis gedeelte zodat de inlegger goed gefixeerd is.

5

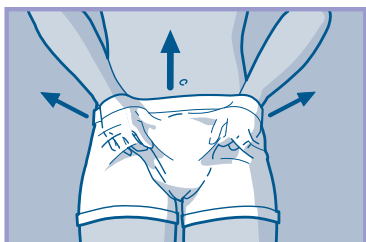

Zodra de Stretch Pant in de juiste positie zit kunt u de inlegger aan voor- en achterzijde nog eens goed recht trekken en gladstrijken. Voorkom dat de voor- of achterzijde niet naar binnen gevouwen zit en goed aansluit op het lichaam.

6

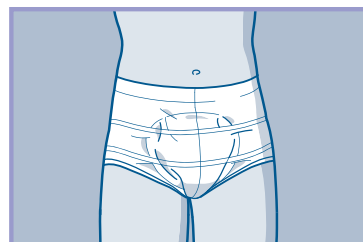

De Attends Stretch Pant moet de inlegger volledig bedekken. Controleer tenslotte of zowel de Stretch pant en inlegger behaaglijk zitten.

Wilt u meer informatie? Bezoek: www.attends.nl of www.attends.be

Hints en Tips

Productkeuze

- De juiste absorptiecapaciteit en het meest geschikte product is afhankelijk van de mate van incontinentie. De beslisboom en het numerieke systeem van Attends is daarbij zeer behulpzaam.
- Maak gebruik van het speciale Attends meetlint en meet daarmee de heup- middelomvang. Op het meetlint of de assortimentskaart van Attends kunt u de benodigde maat handig aflezen.
- De Contours 5 kan eventueel in het eigen, goed aansluitende, ondergoed worden gedragen.
- Grotere producten zijn niet per definitie altijd veiliger! Een gerichte productkeuze biedt meer waardigheid en comfort voor de gebruiker.

Aantrekken

- Vouw het product voor het aanbrengen volledig open. Doe dit liefst enige tijd voor het aanbrengen.
- Schud of klop het product niet uit.
- Plaats het smalle gedeelte aan de voorzijde en het brede gedeelte aan de achterzijde van het lichaam.
- Vouw het product in de lengte open en maak er voorzichtig een bootvorm van zodat de inlegger zijn natuurlijke pasvorm krijgt en de kern zich enigszins vult met lucht.
- Raak de anti-lek randen niet aan, deze zullen zich in de juiste positie uitstrekken met het openvouwen en voorvormen van de inlegger.
- Bij mannen kan de Contours meer naar voren worden gepositioneerd.
- De juiste maat fixatiebroekje is erg belangrijk zodat de inlegger perfect aansluit op het lichaam.
- Indien de inlegger wordt aangebracht bij een liggend persoon dan is dezelfde volgorde van aanbrengen van toepassing als bij een staande positie.

Verwisselen

- Controleer de vochtindicator - indien deze voor meer dan de helft (60%) vervaagd is dan is de inlegger verzadigd en dient te worden vervangen.
- Droge en schone inleggers kunnen na het toiletteren opnieuw worden aangebracht.
- Verwijder verzadigde inleggers via de achterzijde indien mogelijk.
- Verschoon en verzorg de huid volgens voorschrift, bij voorkeur van voor naar achteren.
- Gebruik de inleggers niet in combinatie met zalf, olie of poeder omdat deze de absorptiecapaciteit negatief beïnvloeden. Zodoende wordt urine niet volledig opgenomen waardoor de huid mogelijk geïrriteerd en beschadigd raakt.

Bij doorlekken

- Controleer of het product op de juiste manier is aangebracht en of de juiste absorptiecapaciteit is gebruikt. Attends Contours (Regular/ Air Comfort) is in 7 absorptiecapaciteiten beschikbaar (Contours Regular 5-10, Contours Air Comfort 4-10).
- Controleer of u de juiste maat Stretch Pant heeft gebruikt.
- Verhoog alleen de absorptiecapaciteit als u er zeker van bent dat het product juist is aangebracht en de juiste maat Stretch Pant is gebruikt.

Verwijderen

- Rol de Contours na gebruik op en deponeer deze in de daarvoor bestemde milieu- of verwijderingsbak.
- Spoel de Contours na gebruik nooit door het toilet.
- Attends Stretch Pants zijn herbruikbaar.

Attends® Contours



Attends Contours is getest en goedgekeurd door proDERM, Instituut voor toegepast dermatologisch onderzoek.

Wilt u meer informatie? Bezoek: www.attends.nl of www.attends.be