


Attends® Cover-Dri



Gebruiksaanwijzing


Vorbereiding

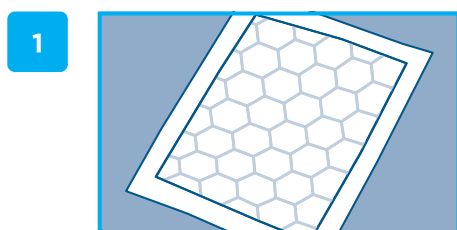

1

Vouw de onderlegger volledig open. Zorg ervoor dat de lichtgekleurde waterdichte antislip onderkant op het bed ligt en de witte, zachte en absorberende kant aan de bovenzijde.


Gebruik

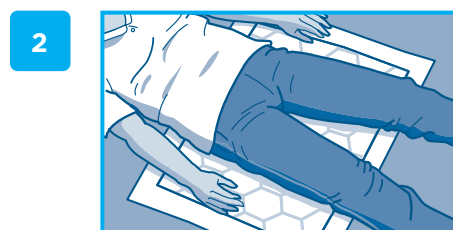

2


Zorg ervoor dat de onderlegger vlak onder het midden van de persoon geïnstalleerd is. Zie de afbeelding hiernaast.

Verwisselen

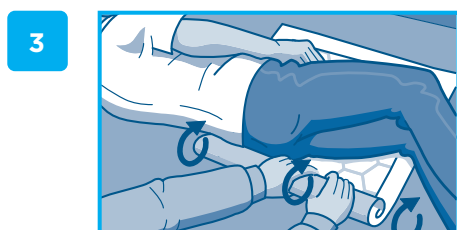


3

Rol de persoon op zijn of haar zijde en rol de gebruikte onderlegger richting de rug van deze persoon.

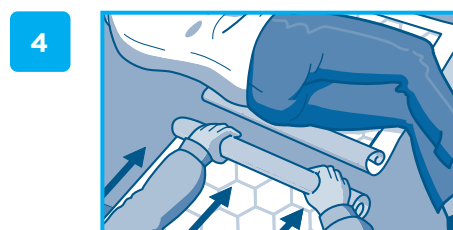


4

Vouw de nieuwe onderlegger open, rol de helft voorzichtig op en leg deze tegen de rug van de liggende persoon aan.

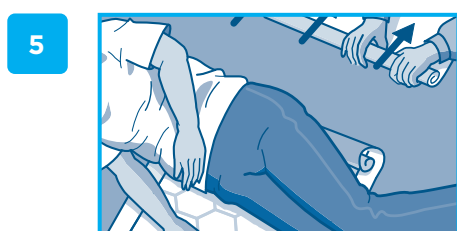

5

Rol de persoon voorzichtig terug in de liggende aanvangspositie en vervolgens op zijn of haar rechterzijde. Verwijder vervolgens de gebruikte onderlegger.

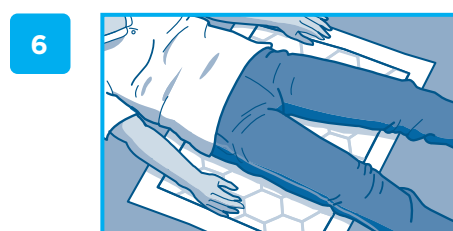

6

Leg de persoon weer in de aanvangspositie op zijn of haar rug en rol de nieuwe onderlegger volledig uit.

Hints en Tips

Productkeuze

- De keuze van maat en absorptiecapaciteit is afhankelijk van de mate van incontinentie of het soort materiaal en ondergrond wat dient te worden beschermd.

Bij doorlekken

- Ga na of de juiste maat of absorptiecapaciteit gekozen is voor de betreffende persoon of situatie waarvoor de onderlegger wordt gebruikt.

Verwijderen

- Rol de onderlegger na gebruik op en deponeer deze in de daarvoor bestemde milieu- of verwijderingsbak.
- Spoel de onderleggers nooit door het toilet



Attends Cover-Dri onderleggers zijn getest en goedgekeurd door proDERM, Instituut voor toegepast dermatologisch onderzoek.

Wilt u meer informatie? Bezoek: www.attends.nl of attends.be