




## SOFT 0 - 7

Attends Soft zijn discrete, absorberende inleggers voor de gevoelige huid. De inleggers kunnen gedragen worden in normaal ondergoed en zijn ontworpen voor zeer lichte tot zware urine-incontinentie.




### Gebruiksaanwijzing

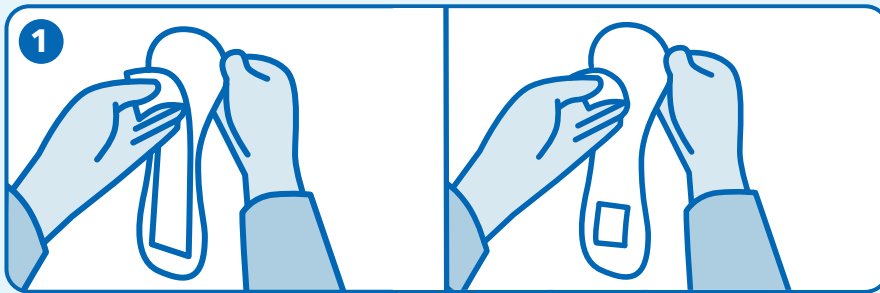


1 Eén zelfklevende plakstrook (van toepassing op Soft 0 - 4). Verwijder de beschermstrook aan de onderkant van de inlegger.

2 Twee zelfklevende plakstroken (van toepassing op Soft 5 - 7). Verwijder de beschermstroken aan de onderkant van de inlegger.

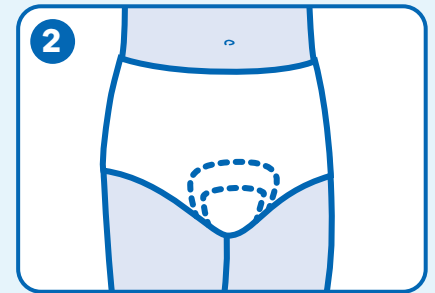

3 Bevestig de inlegger in uw eigen, goed aansluitend ondergoed.

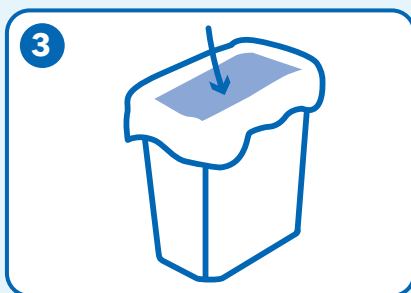

3 Rol na gebruik de inlegger op en deponeer deze bij het gewone afval.

## SOFT 0 - 7

### Hints en Tips

#### Productkeuze

- Selecteer de juiste maat en absorptieniveau.
- Voor een optimaal resultaat, raden we aan om het product te gebruiken in combinatie met nauwsluitend ondergoed.
- Kies voor de kleinst mogelijke maat en een zo laag mogelijk absorptieniveau. Dit helpt om afval te verminderen.

#### Verwijderen

- Rol na gebruik de inlegger op en deponeer deze bij het gewone afval.
- Inleggers die per stuk verpakt zijn - u kunt ook het zakje gebruiken om de inlegger weg te gooien.
- Spoel de inlegger na gebruik nooit door het toilet.



**Huidverdraagzaamheid**  
dermatologisch goedgekeurd  
door proderm, Instituut voor  
Toegepast Dermatologisch  
Onderzoek