

Attends[®] Slip Regular



Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding


- 


1 Maak gebruik van een meetlint en meet daarmee de heup of omvang van het middel. Op het meetlint of de assortimentskaart van Attends kunt u de benodigde maat handig aflezen.
- 

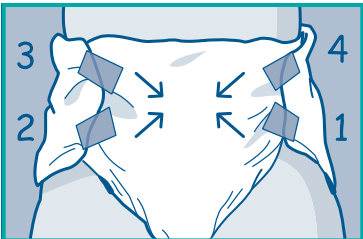
2 Vouw het product voorzichtig open met de heupbanden en plakstrips naar de buitenzijde gevouwen zoals hiernaast weergegeven. Wees er zeker van dat de achterzijde onder ligt en de zachte, absorberende, bovenzijde met anti-lekrandjes naar boven wijst.
- 

3 Vouw een voorzichtigte komvorm over de lengte van de inlegger waardoor de anti-lekrandjes in de juiste positie komen te staan.

Gebruik

- 

4 Positioneer de slip tussen de benen zodat het goed en comfortabel aansluit op het kruis. Gebruik eventueel de vochtindicator om het product correct te centreren.
- 

5 Strek de heupbanden om het middel naar de voorzijde van de slip en sluit de plakstrips zodanig dat de slip goed aansluit.
- 

6 Bevestig de plakstrips zoals hiernaast op het plaatje weergegeven. De onderste plakstrips (1 en 2) als eerste en iets naar boven gericht. Vervolgens de bovenste plakstrips (3 en 4) en iets naar onderen gericht zodat er een goede aansluiting rondom het middel ontstaat.

Wilt u meer informatie? Bezoek: www.attends.nl of www.attends.be

Hints en Tips

Productkeuze

- Overweeg ook het gebruik van geschikte inleggers in combinatie met Stretch Pants in plaats van alleen Slips. Deze zijn in gebruik zeer discreet.
- Maak gebruik van een meetlint en meet daarmee de heup- middelomvang. Op het meetlint of de assortimentskaart van Attends kunt u de benodigde maat handig aflezen.
- De juiste absorptiecapaciteit en het meest geschikte product is afhankelijk van de mate van incontinentie. De beslisboom en het numerieke systeem van Attends is daarbij zeer behulpzaam.
- Slips zijn uitermate geschikt voor zowel zware urine als ontlastingincontinentie.

Verwisselen

- Controleer de vochtindicator - indien deze voor meer dan de helft (60%) vervaagd is dan is de inlegger verzadigd en dient te worden vervangen.
- U kunt de Slip hergebruiken door de hersluitbare plakstrips indien de slip bij het toiletteren schoon en droog is.
- Bevestig geen plakstrip aan de huid.
- Verschoon en verzorg de huid volgens voorschrift, bij voorkeur van voren naar achteren.
- Gebruik de Slips niet in combinatie met zalf, olie of poeder omdat deze de absorptiecapaciteit negatief beïnvloeden. Zodoende wordt urine niet volledig opgenomen waardoor de huid mogelijk geïrriteerd en beschadigd raakt.

Gebruik

- Zorg dat het uitstaande materiaal van de beenelastieken aan de buitenzijde van de Slip blijft.
- Zorg ervoor dat bij het aanbrengen van de slip de plakstrips aan de achterzijde zitten. Zodoende weet u zeker dat de slip juist aangebracht wordt.
- Bevestig bij het aanbrengen van de slip de onderste plakstrips (1 en 2) als eerste en iets naar boven gericht. Vervolgens de bovenste plakstrips (3 en 4) en iets naar onderen gericht zodat er een goede aansluiting rondom de middel ontstaat.
- Indien de slip wordt aangebracht bij een liggende persoon dan is dezelfde volgorde van aanbrengen van toepassing als bij een staande positie.
- Gebruik de vochtindicator op de achterzijde om het product correct te centreren.

Bij doorlekken

- Controleer nogmaals of het product juist is aangebracht en of de juiste absorptiecapaciteit is gekozen.
- Controleer nogmaals of u de juiste maat hebt gekozen.
- Verhoog alleen de absorptiecapaciteit als u er zeker van bent dat het product juist is aangebracht.

Verwijderen

- Rol de Slip na gebruik op en deponeer deze in de daarvoor bestemde milieu- of verwijderingsbak.
- Spoel de Slip na gebruik nooit door het toilet.

Attends® Slip Regular



Attends Slips zijn getest en goedgekeurd door proDERM, Instituut voor toegepast dermatologisch onderzoek.

Wilt u meer informatie? Bezoek: www.attends.nl of www.attends.be