



Breekmethode van ampullen met een Score-ring of Color break ring

Een ampul met een breekring is te herkennen aan een ingeslepen ring (NAFA-scorering) of aan een ingebrande witte keramische verfring (Colour-Break). Zie foto 1.

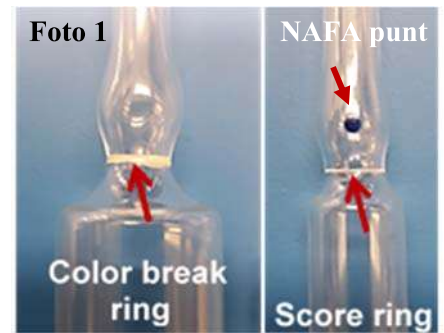


1) Pak met één hand het cilindrische gedeelte van de ampul vast (gedeelte waar de vloeistof in zit), foto 2.

2) Houd de afgevulde ampul schuin en tik met de wijsvinger van de andere hand tegen de hals, zodat alle vloeistof in het cilindrische gedeelte van de ampul komt (Foto 2).

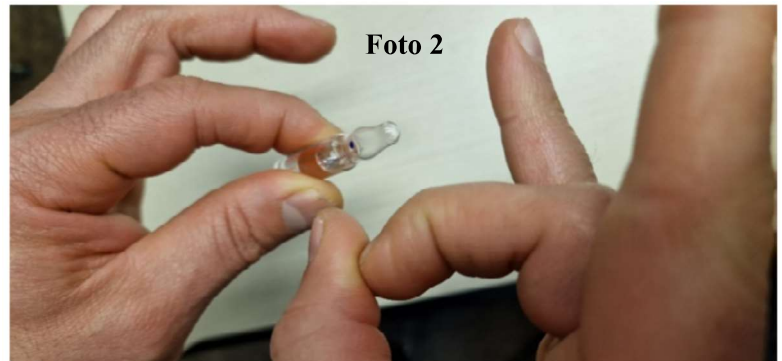

3) Zorg ervoor dat de duim in de insnoering van de ampul rust (het topje van de duim op het cilindrische gedeelte), en houd de wijsvinger op de hals (zie Foto 3).

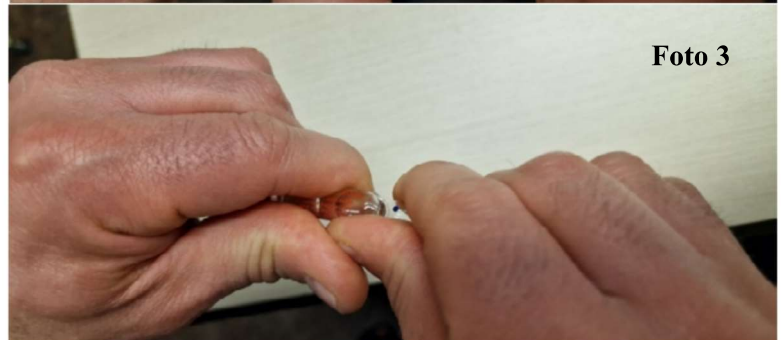

Let op ! NAFA punt in combinatie met een Score-ring is geen indicatie voor breek positie.

4) Trek de wijsvinger naar u toe terwijl met de duim een duwbeweging gemaakt wordt (foto 4).



5) Buig met de andere hand de bodem van de ampul naar U toe (Foto 4).

Let op ! Voorkom doorschieten van je duim over de opening. Door je duim op het cilindrische deel te houden tijdens het breken, voorkom je zelf verwondingen door eventuele splinters op de opening.

6) Ampul is gebroken nu (Foto 5).



Let op ! Als het breken niet lukt, draai ampul een kwartslag en herhaal de stappen zoals boven beschreven.

Noot: Ampullen met een breekring zijn in tegenstelling tot OPC ampullen, in alle richtingen te breken.

Description: Breekmethode van ampullen met een Score-ring, Color break ring en OPC.

Date: 240320 N:\NAFVORG

Par. KD: ak

Par. Dir:

Page : 2.1

Plant Nijmegen

Marialaan 108, 6541 RP, Nijmegen, Netherlands
Tel +31-24-3774670,

www.nafvsm.com, e-mail: info.nl@nafvsm.com

Plant Andeville


Zone Industrielle F-60570 Andeville France
Tel+33-3-44.52.64.90,

www.nafvsm.com, e-mail: info.fr@nafvsm.com



Breekmethode van OPC-ampullen

Foto 1

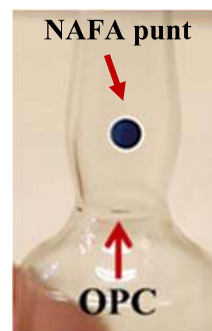

De OPC-ampul is te herkennen aan een zeer klein krasje op de insnoering met daar precies boven een gekleurde punt (NAFA punt). Zie foto 1.

1) Pak met één hand het cilindrische gedeelte van de ampul vast (gedeelte waar de vloeistof in zit).

2) Houd de afgevulde ampul schuin en tik met de wijsvinger van de andere hand tegen de hals, zodat alle vloeistof in het cilindrische gedeelte van de ampul komt.

3) Draai de ampul zodanig dat de punt van U af wijst.

Let op ! NAFA punt in combinatie met een OPC is indicatie voor breek positie.

4) Zorg ervoor dat de duim in de insnoering van de ampul rust (het topje van de duim op het cilindrische gedeelte), en houd de wijsvinger op de hals (zie foto's).

5) Trek de wijsvinger naar u toe terwijl met de duim een duwbeweging gemaakt wordt.

6) Buig met de andere hand de bodem van de ampul naar U toe.



Noot: de ampul is slechts in één richting te breken (in tegenovergestelde richting van de punt). Indien geen punt of krasje dan de ampul NIET breken!

Description: Breekmethode van ampullen met een Score-ring, Color break ring en OPC.

Date: 240320 N:\NAFVORG

Par. KD: ak

Par. Dir:

Page : 2.2

Plant Nijmegen

Marijlaan 108, 6541 RP, Nijmegen, Netherlands
Tel +31-24-3774670,
www.naf-vsm.com, e-mail: info.nl@naf-vsm.com

Plant Andeville

Zone Industrielle F-60570 Andeville France
Tel+33-3-44.52.64.90,
www.naf-vsm.com, e-mail: info.fr@naf-vsm.com

