



# T.E.D.™ Anti-Emboliekousen

## VTE-preventie voor uw patiënt

### Hoe te meten

Bij studies waarin de klinische werking van TED antiemboliekousen is bewezen, werd gebruik gemaakt van dijnlengte kousen. Kies waar mogelijk voor de dijnlengte kousen, tenzij de kniekous geschikter is voor de patiënt in kwestie.



- 1 Meet de bovenomtrek van het dijbeen  
*Als de dijomtrek kleiner is dan 91,4 cm, kies dan voor:  
Dijnlengte kous of dijnlengte kous met tailleband*
- 2 Meet de kuitomtrek op de plaats waar deze het grootst is
- 3 Meet de afstand van de onderkant van de bil tot de hiel  
*Als de dijomtrek groter is dan 91,4 cm, kies dan voor: Kniekous*
- 2 Meet de kuitomtrek op de plaats waar deze het grootst is
- 3 Meet de afstand van de achterkant van de bil tot de hiel

### Selectiegids

#### Stijl: dijnlengte kous



Dijomtrek	1	Kuitomtrek	2	Beenlengte	3	Code	Maat	Kleur	
								Teen	Voetrug
Minder dan 63,5 cm	Minder dan 30,5 cm Small	30,5 tot 38 cm Medium	Minder dan 74 cm Short	3071LF	A				
			74 cm tot 84 cm Regular	3130LF	B				
			84 cm en meer Long	3222LF	C				
			Minder dan 74 cm Short	3310LF	D				
			74 cm tot 84 cm Regular	3416LF	E				
			84 cm en meer Long	3549LF	F				
	38 tot 44,5 cm Large	Minder dan 74 cm Short	3634LF	G					
		74 cm tot 84 cm Regular	3728LF	H					
		84 cm en meer Long	3856LF	J					
		Minder dan 74 cm Short	4010LF	K					
		74 cm tot 84 cm Regular	4114LF	L					
		84 cm en meer Long	4216LF	M					
63,5 tot 81,3 cm	44,5 tot 54,6 cm Extra Large Plus	Minder dan 74 cm Short	3180LF	N					
		74 cm tot 84 cm Regular	3181LF	P					
		84 cm en meer Long	3182LF	Q					
		Minder dan 74 cm Short	3183LF	R					
		74 cm tot 84 cm Regular	3184LF	S					
		84 cm or more Long	3185LF	T					

**LET OP** - Het is essentieel nauwkeurig te meten, zodat uw patiënten de juiste compressiegraden krijgen. Als u de maatgids volgt, zal het mogelijk zijn de juiste stijl en de aangepaste maat van de TED-kous te selecteren.

### Pasgids



Steek uw hand in de kous en pak de hiel vast.



Draai de kous binnenstebuiten.



Plaats de kous over de voet. Zorg daarbij dat de teeninspectieopening onder de tenen terechtkomt. Controleer of de hiel van de patiënt recht in de hiel van de kous zit.



Nadat de kous over de kuit is getrokken, de kous naar binnen draaien op de plaats waar de druk wegvalt, zodat het inzetstuk ter hoogte van de slagader in de dij terechtkomt (enigszins naar de binnenkant van het dijbeen toe). De verandering in het weefpatroon in de lange kous dient 3-5 cm onder de knie te zitten. Bij kniekousen dient de bovenrand 3-5 cm onder de knie te zitten.

#### Stijl: dijnlengte kous met tailleband



Dijomtrek	1	Kuitomtrek	2	Beenlengte	3	Code	Maat	Kleur	
								Teen	Voetrug
Minder dan 63,5 cm	Minder dan 25 cm Extra Small	25 tot 30,5 cm Small	Minder dan 71 cm Regular	3306	-				
			71 cm en meer Long	3320	-				
			Minder dan 72 cm Regular	3039-	A+				
			72 cm en meer Long	3364	B+				
			Minder dan 72 cm Regular	3144	C+				
			72 cm en meer Long	3449	D+				
	30,5 tot 38 cm Medium	38 tot 44,5 cm Large	Minder dan 74 cm Regular	3221	E+				
		74 cm en meer Long	3523	F+					
		63,5 tot 81,3 cm	38 tot 44,5 cm Extra Large	Minder dan 72 cm Regular	3922	G+			
				72 cm en meer Long	3995	H+			

Kousen moeten elke 2 à 3 dagen worden gewassen, tenzij ze vuil zijn (in dat geval moeten ze onmiddellijk worden gereinigd/vervangen). Het witwassen verhoogt de kwaliteitsduur door lichaamsecreties uit de elastische draden te verwijderen.

Download de **GRATIS T.E.D.™ APP** en ontdek de maten en aantrekmogelijkheden.



Enkel voor medische professionals. **Belangrijk:** Voor gebruik, raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij dit apparaat voor indicaties, contra-indicaties, bijwerkingen, voorgestelde procedure, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. Als onderdeel van haar voortdurende beleid voor productontwikkeling, behoudt Cardinal Health zich het recht om productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Neem contact op met uw Cardinal Health vertegenwoordiger voor bijkomende productinformatie. © 2019 Cardinal Health. Alle rechten voorbehouden. CARDINAL HEALTH, Cardinal Health LOGO, ESSENTIAL TO CARE en T.E.D. zijn handelsmerken van Cardinal Health en kunnen geregistreerd zijn in de VS en/of in andere landen. 2PATR18-864351-01 (06/2019)

#### Stijl: knielengte



Kuitomtrek	2	Beenlengte	3	Code	Maat	Kleur	
						Teen	Voetrug
Minder dan 30,5 cm Small			Minder dan 41 cm Regular	7071-	A-		
			41 cm en meer Extra Long	7339	B-		
30,5 tot 38 cm Medium			Minder dan 43 cm Regular	7115	C-		
			43 cm en meer Extra Long	7480	D-		
38 tot 44,5 cm Large			Minder dan 46 cm Regular	7203-	E-		
			46 cm en meer Extra Long	7594	F-		
44,5 tot 51 cm Extra Large			Minder dan 46 cm Regular	7604-	G-		
			46 cm en meer Extra Long	7802-	H-		
51 tot 58,4 cm Extra Extra Large			Minder dan 46 cm Regular	7470LF	J-		
			46 cm en meer Extra Long	7471LF	K-		
58,4 tot 66 cm Extra Extra Extra Large			Minder dan 46 cm Regular	7472LF	L-		
			46 cm en meer Extra Long	7473LF	M-		

**MCONTRA-INDICATIES:** Massief oedeem van de benen of pulmonair oedeem bij hartfalen. Extreme misvorming van het been. Elke lokale beentoonstand waarin kousen zouden interfereren, zoals:

- 1) Dermatitis
- 2) Vaatligatuur (postoperatief)
- 3) Gangreen
- 4) Recente huidtransplantatie