

T.E.D.™ Anti-embolie kousen



Indicaties

1. Profylaxe tegen diepe veneuze trombose bij medische en chirurgische patiënten
2. Het bieden van graduele compressie en daarmee het verhogen van de veneuze bloedstroom in alle omstandigheden waar dit geïndiceerd is, met inbegrip van veneuze aandoeningen en spataderen
3. Voor gebruik bij andere aandoeningen zoals voorgeschreven door een arts

Contraindicaties

De kousen zijn niet aanbevolen voor patiënten met :

1. Elke plaatselijke beenaandoening waarbij kousen een hinder kunnen vormen zoals: dermatitis, aderligatie (post operatief) gangreen of een recente huidtransplantatie.
2. Ernstige aderverkalking of andere ischemische vaatziekte
3. Een uitgebreid oedeem van de benen of longoedeem als gevolg van congestief hartfalen.
4. Een extreme misvorming van het been.

Bijzondere eigenschappen

- De onderbroken band en de tweelaagse inzet verlichten de druk op de femorale ader om een tourniquet-effect te helpen voorkomen en stimuleert de terugstroom van bloed (alleen dijbeenlengte)
- Drukpaauze en steekverandering in het knieholtegebied zorgen voor drukontlasting in het gebied van de knie tot aan de onderzijde van de dij om een soepele bloedstroom door het kritieke knieholtegebied te garanderen
- Ingelegd omtrekbarewerk biedt eenrichtingsrek en elasticiteit; behoudt het juiste drukpatroon
- De voorgevormde hiel helpt het correct positioneren van het been van de patiënt

Onderhoud

- De naar behoren aangemeten kousen moeten dagelijks tijdens het wassen worden uitgetrokken om, indien mogelijk, de conditie van de huid te inspecteren.
- Normale wasprocedures kunnen worden gebruikt met zowel handwas als machinewas met koud water in een fijnwasprogramma. Ophangen of plat neerleggen om aan de lucht te drogen. Vermijd contact met chloorbleekwater.

Productinformatie

Omschrijving: Biedt graduele compressie

Stijl: Open teen, gesloten teen (voor doorlopende zorg); dij lengte, dij lengte met riem, knielengte

Drukpatroon: Klinisch bewezen drukpatroon (zie onderstaand diagram)

Biocompatibiliteit: Voldoet aan ISO 10993-1

Houdbaarheid:

- **In de verpakking:** 5 jaar
- **Uit de verpakking:** 10 wasbeurten (20 dagen om de andere dag gewassen)

PVC-gehalte: Niet mee vervaardigd

DEHP-gehalte: Niet mee vervaardigd

Latexgehalte: Niet mee vervaardigd


CE gemarkeerd: Ja

Vervaardigd in Costa Rica

Fabrikant: Cardinal Health

Recycling: Doos en karton zijn 100% recyclebaar. Binnenverpakking is gebleekt.

Klinisch bewezen drukpatroon

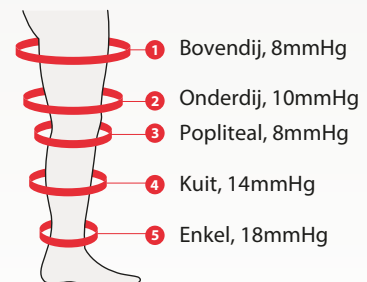

Cardinal Health™ T.E.D.™ Anti-embolieken

Verpakking en materiaal

Productcodes	Omschrijving	Paar/ polybag	Polybags/ karton	Kartons/ doos	Totaal paren	Product- materiaal	Verpakkings- materiaal	Verpakkings- afmetingen L x B x H
3071LF, 3130LF, 3222LF, 3310LF, 3416LF, 3549LF, 3634LF, 3728LF, 3856LF, 4010LF, 4114LF, 4216LF, 3180LF, 3181LF, 3182LF, 3183LF, 3184LF, 3185LF	Open teen, dijlengte	1	6	6	36	Kous en inzet: Nylon ≥ 86%, polyester, roica Band: Elastomeer, silicone, polyester; Hittestempel: PMS 281C Blue	Polybag: EVA lage dichtheid polyethyleen Karton: Gecoat gebleekt thermo-mechanische pulp en molen gebroken/ongebleekt pulp karton Doos: Enkelwandig golfkarton	Polybag: 26,01 x 17,5 cm Karton: 18,4 x 14,9 x 16 cm Doos: 45,88 x 19,37 x 32,39 cm
3306, 3320, 3039, 3364, 3144, 3449, 3221, 3523, 3922, 3995	Open teen, dijlengte met tailleband	1	6	6	36	Kous en inzet: Nylon ≥ 86%, polyester, lycra, roica Band en riem: Polyamide, polyester Hittestempel: PMS 281C Blue	Polybag: EVA lage dichtheid polyethyleen Karton: Gecoat gebleekt thermo-mechanische pulp en molen gebroken/ongebleekt pulp karton Doos: Enkelwandig golfkarton	Polybag: 26,01 x 17,5 cm Karton: 18,4 x 14,9 x 16 cm Doos: 45,88 x 19,37 x 32,39 cm
7071, 7339, 7115, 7480, 7203, 7594, 7604, 7802, 7470LF, 7471LF, 7472LF, 7473LF	Open teen, knielengte	1	12	6	72	Kous: Nylon ≥ 79%, polyester, lycra, roica Hittestempel: PMS 281C Blue	Polybag: EVA lage dichtheid polyethyleen Karton: Gecoat gebleekt thermo-mechanische pulp en molen gebroken/ongebleekt pulp karton Doos: Enkelwandig golfkarton	Polybag: 26,01 x 17,5 cm Karton: 18,4 x 14,9 x 16 cm Doos: 145,88 x 19,37 x 32,39 cm
4297, 4300, 4303, 4298, 4301, 4304, 4299, 4302, 4305	Gesloten teen, Dijlengte	nvt	1	6	6	Kous en inzet: Nylon ≥ 86%, polyester, roica Band: Elastomeer, silicone, polyester; Hittestempel: PMS 281C Blue	Karton: Stevig gebleekt sulfaatkarton met lage dichtheid Doos: Enkelwandig golfkarton	Karton: 13,97 x 2,92 x 18,92 cm Doos: 19,05 x 15,56 x 20,96 cm
4278, 4265, 4434, 4282, 4317, 4572, 4279, 4271, 4435, 4283, 4323, 4573, 4280, 4289, 4436, 4284, 4335, 4574, 4281, 4296, 4437, 4285, 4344, 4575	Gesloten teen, knielengte	nvt	1	12	12	Body: Nylon ≥ 79%, polyester, roica Hittestempel: PMS 281C Blue	Karton: Stevig gebleekt sulfaatkarton met lage dichtheid Doos: Enkelwandig golfkarton	Carton: 13,97 x 1,91 x 18,89 cm Doos: 29,21 x 13,34 x 20,64 cm

Wegwerpen van kousen: Volg het protocol voor de juiste verwijdering van medisch afval.

Cardinal Health™ T.E.D.™ Anti-emboliekousen

Maattabel: Gesloten teen, dijlgte

Productcode	Dijomtrek	Kuitomtrek	Beenlengte	Kleur	Maat	
4297	< 63,5 cm	< 30,5 cm	< 74 cm	Wit	Small kort	
4300			74-84 cm	Wit	Small normaal	
4303			> 84 cm	Wit	Small lang	
4298		30,5-38 cm	< 74 cm	Wit	Medium kort	
4301				74-84 cm	Wit	Medium normaal
4304				> 84 cm	Wit	Medium lang
4299		38-44,5 cm	< 74 cm	Wit	Large kort	
4302				74-84 cm	Wit	Large normaal
4305				> 84 cm	Wit	Large lang



Witte dijlgte kousen met gesloten teen

Maattabel: gesloten teen, knielengte

Productcode	Kuitomtrek	Beenlengte	Kleur	Maat	
4278	< 30,5 cm	< 41 cm	Wit	Small normaal	
4265			Beige	Small normaal	
4434			Zwart	Small normaal	
4282		≥ 41 cm	Wit	Wit	Small normaal
4317				Beige	Small lang
4572				Zwart	Small lang
4279	30,5-38 cm	< 43 cm	Wit	Medium normaal	
4271			Beige	Medium normaal	
4435			Zwart	Medium normaal	
4283		≥ 43 cm	Wit	Wit	Medium lang
4323				Beige	Medium lang
4573				Zwart	Medium lang
4280	38-44,5 cm	< 46 cm	Wit	Large normaal	
4289			Beige	Large normaal	
4436			Zwart	Large normaal	
4284		≥ 46 cm	Wit	Wit	Large normaal
4335				Beige	Large lang
4574				Zwart	Large lang
4281	44,5 - 51 cm	< 46 cm	Wit	X-large normaal	
4296			Beige	X-large normaal	
4437			Zwart	X-large normaal	
4285		≥ 46 cm	Wit	Wit	X-large lang
4344				Beige	X-large lang
4575				Zwart	X-large lang



Beige en zwarte knielengte kousen met gesloten teen

Cardinal Health™ T.E.D.™ Anti-emboliekousen

Mattabel: Open teen, dijlgte


Product-code	Dijomtrek	Kuitomtrek	Beenlgte	Maat	Kleur teen	Kleur lgte	Omschrijving maat	
3071LF	< 63,5 cm	< 30,5 cm	< 74 cm	A	Geel	Geel	Small kort	
3130LF			74-84 cm	B	Geel	Wit	Small normaal	
3222LF			> 84 cm	C	Geel	Blauw	Small lang	
3310LF		30,5-38 cm	< 30,5 cm	< 74 cm	D	Grijs	Geel	Medium kort
3416LF				74-84 cm	E	Grijs	Wit	Medium normaal
3549LF				> 84 cm	F	Grijs	Blauw	Medium lang
3634LF		38-44,5 cm	< 30,5 cm	< 74 cm	G	Blauw	Geel	Large kort
3728LF				74-84 cm	H	Blauw	Wit	Large normaal
3856LF				> 84 cm	J	Blauw	Blauw	Large lang
4010LF	63,5-81,3 cm	38-44,5 cm	< 74 cm	K	Groen	Geel	X-large kort	
4114LF			74-84 cm	L	Groen	Wit	X-large normaal	
4216LF			> 84 cm	M	Groen	Blauw	X-large lang	
3180LF		44,5-55 cm	< 30,5 cm	< 74 cm	N	Groen	Geel	X-large kort
3181LF				74-84 cm	P	Groen	Wit	X-large normaal
3182LF				> 84 cm	Q	Groen	Blauw	X-large lang
3183LF	81,3-91,4 cm	55-66 cm	< 74 cm	R	Roos	Geel	XX-large kort	
3184LF			74-84 cm	S	Roos	Wit	XX-large normaal	
3185LF			> 84 cm	T	Roos	Blauw	XX-large lang	



Witte dijlgte kous met open teen

Maattabel: Open teen, dijlgte met tailleband

Product-code	Dijomtrek	Kuitomtrek	Beenlgte	Maat	Kleur teen	Kleur lgte	Omschrijving maat	
3306	< 63,5 cm	< 25 cm	< 71 cm	AA+	Oranje	Wit	X-small normaal	
3320			> 71 cm	BB+	Oranje	Blauw	X-small lang	
3039		25-30,5 cm	< 25 cm	< 72 cm	A+	Groen	Wit	Small normaal
3364				≥ 72 cm	B+	Groen	Blauw	Small lang
3144		30,5-38 cm	< 25 cm	< 72 cm	C+	Grijs	Wit	Medium normaal
3449				≥ 72 cm	D+	Grijs	Blauw	Medium lang
3221		38-44,5 cm	< 25 cm	< 74 cm	E+	Blauw	Wit	Large normaal
3523				≥ 74 cm	F+	Blauw	Blauw	Large lang
3922		63,5-81,3 cm	< 25 cm	< 72 cm	G+	Groen	Wit	X-large normaal
3995				≥ 72 cm	H+	Groen	Blauw	X-large lang

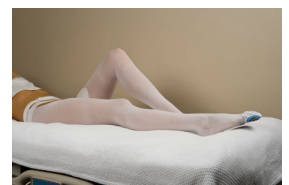

Witte dijlgte kousen met tailleband met open teen

Cardinal Health™ T.E.D.™ Anti-emboliekousen

Maattabel: Open teen, knielengte

Product-code	Kuitotrek	Beenlengte	Maat	Kleurteen	Kleur lengte	Omschrijving maat
7071	< 30,5 cm	< 41 cm	A-	Geel	Wit	Small normaal
7339		≥ 41 cm	B-	Geel	Blauw	Small lang
7115	30,5-38 cm	< 43 cm	C-	Grijs	Wit	Medium normaal
7480		≥ 43 cm	D-	Grijs	Blauw	Medium lang
7203	38-44,5 cm	< 46 cm	E-	Blauw	Wit	Large normaal
7594		≥ 46 cm	F-	Blauw	Blauw	Large lang
7604	44,5-51 cm	< 46 cm	G-	Groen	Wit	X-large normaal
7802		≥ 46 cm	H-	Groen	Blauw	X-large lang
7470LF	51-58,4 cm	< 46 cm	J-	Roos	Wit	XX-large normaal
7471LF		≥ 46 cm	K-	Roos	Blauw	XX-large lang
7472LF	58,4-66 cm	< 46 cm	L-	Bruin	Wit	XXX-large normaal
7473LF		≥ 46 cm	M-	Bruin	Blauw	XXX-large lang



Witte knielengte kousen met open teen

Neem voor meer informatie of om een bestelling te plaatsen contact op met uw vertegenwoordiger van Cardinal Health.

Referenties:

- Sachdeva A, Dalton M, Lees T. Graduated compression stockings for prevention of deep vein thrombosis. Cochrane Database Syst Rev. 2018;11:Cd001484
- Sigel B., et al. Type of Compression for Reducing Venous Stasis. Archives of Surgery. 1975; 110: 171-175
- Sigel B, Edelstein AL, Felix WR, Jr., Memhardt CR. Compression of the deep venous system of the lower leg during inactive recumbency. Archives of surgery (Chicago, Ill : 1960). 1973;106(1):38-43.
- Jamieson R, Calderwood CJ, Greer IA. The effect of graduated compression stockings on blood velocity in the deep venous system of the lower limb in the postnatal period. BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology. 2007;114(10):1292-4.

cardinalhealth.co.uk

Enkel voor medische professionals.

Belangrijk: Voor gebruik, raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij dit apparaat voor indicaties, contra-indicaties, bijwerkingen, voorgestelde procedure, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. © 2021 Cardinal Health. Alle rechten voorbehouden. CARDINAL HEALTH, het Cardinal Health LOGO, ESSENTIAL TO CARE en T.E.D. zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Cardinal Health. 2GM21-1314529 (01/2021)

