



1- Product

1.1- Presentatie

Bedpan liner & Commode liner (ondersteek-, toiletzak ineen) met treksluiting en super absorberende inlegger.

Absorptiecapaciteit: 700 ml.

1.2- Omschrijving

- Ovangzak: LDPE, met blauwe PEHD treksluiting. Afmetingen: 59 x 40 cm, 32µm.
- Super absorberende inlegger: Non-woven met fluff en super absorberende polymeren (SAP), 27 x 13 cm met een absorptiecapaciteit van 700 ml.

2- Gebruik

2.1- Gebruikersinstructie

1. Open de doos.
2. Rol de eerste zak bedpanliner/commodeliner PRO af en scheur hem af langs de perforatie.
3. Open de zak, plaats hem goed over de bedpan inclusief steel of emmer en vouw hem over de rand. Draai de bedpan/emmer om en trek de koorden aan. Draai de bedpan/emmer weer om.
4. Zorg ervoor dat de absorberende inlegger op de bodem ligt.
5. Wacht circa 1 minuut na gebruik totdat de inlegger (± 700 ml) in gel is veranderd.
6. Sluit de zak door aan de treksluiting te trekken. Knoop de zak zowel bovenop de zak met de lussen dicht als om de hals van de zak (dubbele knoop).
7. Gooi de zak weg bij het restafval of volgens protocol van de instelling. Bij vacumeren de zak niet sluiten.

2.2- Verwijdering

Gooi de zak weg bij het restafval of volgens het protocol van de instelling. Dit product voldoet aan de regelgeving inzake milieuvervuiliingsrisico's bij verbranding en het laat geen gechloroerde derivaten vrij wat kan uitmonden in dioxine.

2.3- Voorzorg

Disposable product. Bij oogcontact grondig spoelen met water en raadpleeg een arts indien nodig. Bij inslikken onmiddellijk een arts raadplegen. Buiten het bereik van kinderen bewaren.

3- Regelgeving

3.1- Conformiteit:

CE markering. Voldoet aan de Europese regelgeving voor medische hulpmiddelen Class I.

3.2- Identificatie:

Elk product is voorzien van een lot nummer.

3.3- Douane:

3923210000 (Volgens Europese regelgeving).

3.4- Veiligheid:

Dit product wordt volgens de Europese regelgeving niet gezien als gevaarlijk. Safety data sheet op aanvraag.

4- Verpakking

Ref.	Verpakking	Omdoos	Pallet
Artikelnummer 7711155	Rol met 20 zakken 200 x 115 x 115mm 0,8 kg	18 verpakkingen met 20 zakken (360 zakken totaal) 415 x 365 x 365mm - 16 kg	30 dozen - 540 rollen (10.800 zakken) 80 x 120 x 200 cm (5 lagen van elk 6 dozen) 490 kg

Registered International brand, patents and designs - Dimensions, weight, volume: +/- 5% - Version: NL 12102022



ISO Certified
9001/13485

CLEANIS S.A.S.
Exclusief gedistribueerd
door:

OmniMedical
Lingewei 9 | 4004 LK Tiel
Tel. 0344 651 444

Email:
info@omnimedical.nl

Website:
www.omnimedical.nl